

Superficies DESINFECCIÓN



Características:

- Líquido para la desinfección rápida de pequeñas superficies en el entorno médico y odontológico.
- Es ideal para la desinfección de superficies como encimeras, mesas, picaportes, barandillas, mobiliario de las clínicas o para equipos médicos-odontológicos no invasivos.
- El producto tiene acción bactericida, levuricida, microbactericida y virucida limitada (contra el rotavirus y el norovirus), así como acción contra los virus encapsulados (como el virus vacuna, BVDV, coronavirus, VIH, HBV o HCV).

Presentación:

- Bote de 5 litros.



Eficacia microbiológica:

Bacterias (incluyendo MRSA) conforme a la norma EN 13697 - 30 s., 60 s., conforme a la norma EN 13727 - 30 s., conforme a la norma EN 16615 - 30 s., hongos levaduriformes (C. albicans) conforme a la norma EN 13624 - 15 s., conforme a la norma EN 13697 - 30 s.*, conforme a la norma EN 16615 - 30 s, Bacilos de la tuberculosis (M. terrae) conforme a la norma EN 14348 - 30 s., Virus envueltos (Vaccinia, coronavirus, VIH, VHB, VHC) conforme a la norma EN 14476 - 30 s.*, 60 s., VDVV conforme a la norma EN 14476 - 30 s., Virus Rota conforme a la norma EN 14476 - 30 s.*, 60 s., Virus Noro conforme a la norma EN 14476 - 30 s. (*condiciones limpias).*

Modo de empleo

1. Aplicar el preparado sobre la superficie a una distancia de unos 30 cm cubriéndola en su totalidad.
2. Esperar 30 segundos.
3. No es necesario aclarar el resto de la superficie con agua potable si no está en contacto con alimentos.
4. No aplicar en superficies sensibles a la acción del alcohol (p. ej., vidrio acrílico).
5. Cerrar bien el envase después de utilizarlo.

Composición:

100 g del producto contiene: 63,7g etanol, 6,3g 2-propanol

Precauciones de uso:

- Mantener el producto alejado del calor.
- Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Usar guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección facial.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. No se frote o cierre los ojos. Qítense las lentes de contacto, si las lleva y le resulta sencillo hacerlo. Continúe enjuagando.
- En caso de ingestión consultar a un médico mostrándole la Ficha de Seguridad del Producto En caso de contacto con la piel (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese. En caso de lesiones en la piel, consulte a un médico.
- En caso de inhalación: En caso de mostrar síntomas de intoxicación, salir del lugar de exposición y tomar aire fresco.
- Eliminar el contenido/envase conforme a la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos.
- La información detallada sobre las medidas de primeros auxilios se incluye en la Ficha de Datos de Seguridad.