

# Aspiración DESINFECCIÓN



## Características:

- Concentrado indicado tanto para la limpieza como para la desinfección de dispositivos de succión, separadores de amalgama y escupideras de sillones dentales.
- El producto no genera espuma.
- El uso diario evita que se formen biopelículas

## Presentación:

- Bote de 5 litros.



## Eficacia microbiológica:

Bacterias (como SARM) según la norma EN 13727 (carga orgánica baja y alta): 1 % - 15 min; hongos (*C. albicans*) según las normas: EN 13624 (carga orgánica baja): 1 % - 15 min, EN 13624 (carga orgánica alta): 1 % - 30 min y 2 % - 15 min; bacilos de tuberculosis según las normas: EN 14348 (carga orgánica alta): 4 % en 60 min; virus encapsulados según la norma EN 14476 (carga orgánica baja y alta): 2 % - 15 min.

## Modo de empleo

- Para conseguir una concentración del 2 %, disolver 20 ml de concentrado en 980 ml de agua.
- Aplicar la solución a los sistemas de succión una o dos veces al día en función del nivel de suciedad.
- Aspirar el producto, desconectar el dispositivo y dejar actuar durante al menos 15 minutos.
- Una vez desinfectado el dispositivo de succión, aclarar con agua.
- Se puede aclarar una vez transcurrido el tiempo recomendado de desinfección o al día siguiente, inmediatamente después de encender la unidad.
- No mezclar con otros productos de limpieza ni desinfectantes.

## Composición:

**100 g del producto contiene:** 4,4 g de cloruro de dimetildioctilamonio (CAS: 5538-94- 3), 0,6 g de cloruro de benzalconio (CAS: 85409-22-9).

## Precauciones de uso:

- Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Usar guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección facial.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No induzca el vómito.
- En caso de contacto con la piel (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Qítense las lentes de contacto, si las lleva y le resulta sencillo hacerlo. Continúe enjuagando.
- Eliminar el contenido/envase conforme a la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos.
- La información detallada sobre las medidas de primeros auxilios se incluye en la Ficha de Datos de Seguridad.