



Pasta Pulido

Pasta de pulido de composite

Referencia:

ML90502

Descripción:

Pasta blanca de pulido tixotrópica para composites, desarrollada para uso profesional en odontología. Este producto mejora la apariencia estética del diente restaurado; mantiene la función del diente restaurado; protege las estructuras biológicas de los dientes restaurados y los tejidos adyacentes.

Composición:

Glicerol 50-70%, partículas de óxido de aluminio ultrafinas 30-50%, excipientes.

Indicaciones:

Para el acabado y pulido de las restauraciones (ayuda a restablecer los contornos normales, proporcionando márgenes lisos y un alto brillo que mejora la apariencia y longevidad de la restauración).

Ventajas:

- Partículas ultrafinas de óxido de aluminio que mejoran la apariencia estética del diente restaurado.
- Garantiza una superficie de alto brillo.
- Viscosidad óptima.
- Fácil de usar.

Contraindicaciones:

Pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas, irritaciones graves al producto o a cualquiera de sus ingredientes.

Efectos secundarios:

En personas susceptibles, el producto puede causar reacciones alérgicas o irritación (en piel, ojos, mucosas y/o tracto respiratorio).

Pasta Pulido

Pasta de pulido de composite

**Usuario:**

Está desarrollado únicamente para uso profesional odontológico.

Esterilidad:

Producto no esterilizado. No necesita esterilización, limpieza o desinfección previa, mantenimiento preventivo, regulación o calibración para garantizar que el producto funcione de manera adecuada y segura durante su vida útil prevista. Sin embargo, no lo use si el envase principal está dañado.

Medio ambiente para su uso:

Este producto está diseñado para ser usado en clínicas dentales donde la temperatura ambiente oscila entre 18 a 25 °C. La cantidad dispensada de material es adecuada para un solo uso (un paciente). No reutilizar. La cantidad dispensada que no se mantenga en la jeringa puede perder su función.

Advertencias:

Después de extruir la cantidad deseada de material, cierre inmediatamente la tapa de la jeringa. No utilice el producto en pacientes que tengan antecedentes de reacciones alérgicas o de irritación graves producidas por el producto o cualquiera de sus componentes. Este producto no emite radiación y tampoco causa interferencias electromagnéticas.

Precauciones:

Se recomienda utilizar barreras de bioseguridad durante la aplicación del producto. CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto y continúe enjuagando. Consulte con su médico si la irritación ocular persiste. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LAS MUCOSAS: Lave con abundante agua. Busque atención médica si se produce irritación o sarpullidos en la piel o mucosas. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. EN CASO DE INGESTA: Enjuáguese la boca. Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se encuentra bien. EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona a tomar aire fresco. Lávese bien las manos después de manipular el producto. Utilice el producto solo en un área bien ventilada. Se recomienda utilizar guantes, ropa protectora, protección ocular y facial para el médico y el paciente.

Vida útil:

La vida útil del producto es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. No lo use después de la fecha de caducidad.

Almacenamiento:

Mantenga el producto cerrado en un lugar seco y ventilado de 4 a 28 °C. Protéjase de la luz solar directa y de las fuentes de calor. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Residuos:

Elimine el contenido o recipiente según los reglamentos nacionales sobre el tratamiento y eliminación de residuos.

Contenido:

4g de pasta de pulido jeringa.