



**Perla**  
*Home*

## Blaqueamiento dental domiciliario ML90136

### Descripción:

Perla Home es un sistema de blanqueamiento dental domiciliario de uso ambulatorio, siempre bajo supervisión del odontólogo, quien ajustará las férulas y dará las pautas para su uso seguro en casa. Proporciona un método estético, seguro y no invasivo para aclarar el color dental de forma progresiva y controlada.

Formato: 5 jeringas de gel blanqueador de 3 ml (peróxido de carbamida al 16%).

### Composición:

- Agua
- Peróxido de carbamida
- Triethanolamine
- Hydroxypropyl methylcellulose
- Xilitol
- Carbomer

### Características:

- Tratamiento seguro y controlado.
- Resultados progresivos y naturales.
- Uso domiciliario con supervisión profesional.
- No requiere sesiones clínicas adicionales.
- Aplicación diaria de corta duración (40–50 minutos).
- Tratamiento adaptable según la sensibilidad y comodidad del paciente.
- Resultados visibles desde la primera semana.

## Blanqueamiento dental domiciliario

### Indicaciones:

Perla Home está indicado para pacientes que desean aclarar el color de sus dientes de forma segura y progresiva, siempre bajo recomendación y supervisión del odontólogo.

### Modo de uso:

- Aplicar una pequeña cantidad de gel en la férula (una gota por diente).
- Colocar la férula en boca asegurando un ajuste correcto.
- Usar durante 40–50 minutos por sesión.
- Duración aproximada del tratamiento: 1 a 3 semanas.
- Utilizar aproximadamente 1 jeringa por semana.
- Ajustar la frecuencia según las molestias, sensibilidad y comodidad del paciente, siempre bajo vigilancia profesional.
- Tras cada uso, retirar la férula, enjuagar la boca y limpiar la férula.

### Precauciones:

- No indicado en casos de amelogénesis imperfecta.
- No indicado en casos de fluorosis severa.
- No indicado en manchas intensas por tetraciclinas.
- Evitar su uso en pacientes con diabetes no controlada.
- No usar en pacientes con lesiones gingivales activas.
- No usar en mujeres embarazadas.
- No usar en menores de 18 años.
- Informar al paciente sobre posible sensibilidad dental o gingival transitoria.

### Recomendaciones durante el tratamiento:

- Evitar alimentos y bebidas con alto poder pigmentante: café, té, vino tinto y tabaco.
- Mantener una correcta higiene oral.
- En caso de sensibilidad, espaciar las aplicaciones y consultar con el odontólogo.

### Almacenamiento:

- Mantener refrigerado entre 2–8 °C.
- Extraer la jeringa del refrigerador 50 minutos antes de cada sesión para que alcance temperatura ambiente, facilitando su aplicación y optimizando la activación del peróxido.