



Perla
Office

Blaqueamiento dental en clínica ML90106

Descripción:

Blanqueamiento Perla Office es un producto de uso profesional en clínica. Proporciona un método estético, seguro y no invasivo para aclarar los dientes, incluidos los dientes endodonciados. Presenta un formato de doble jeringa con dos canales independientes: uno contiene peróxido de hidrógeno al 35 % y el otro, gel activador.

Composición:

- Agua
- Peróxido de hidrógeno
- Triethanolamine
- Hydroxypropyl methylcellulose

Características:

- Aplicación cómoda.
- Dosificación precisa.
- Activación química.
- Fotoactivación.
- pH neutro, que reduce el riesgo de sensibilidad.
- Aclaramiento de hasta 4 tonos.
- Sin daños al esmalte.
- Aclara todos los dientes; la intensidad del aclaramiento depende del tipo de tinción y de las condiciones del paciente.

Propiedades físicas:

- Activación química: 2 a 3 ciclos de 18 min.
- Fotoactivación: 2 a 3 ciclos de 12 min.

Indicaciones:

- Blanqueamiento dental.
- Blanqueamiento dental interno en dientes endodonciados.

Precauciones:

- Distribución exclusiva a odontólogos.
- No ingerir.
- Se recomienda no realizar tratamientos prolongados.
- No usar en mujeres embarazadas.
- No usar en menores de 18 años.
- Evitar su uso en pacientes con lesiones gingivales.
- Evitar el contacto con los ojos.

Almacenamiento:

- Mantener refrigerado entre 4°C y 8°C.

Contenido:

Perla Office – 3 pacientes

- 3 jeringas dobles de 4 ml con peróxido de hidrógeno al 35%.
- 3 barreras gingivales de 1,2g.
- 3 pinceles aplicadores.
- 3 bastoncillos con vitamina E.
- 3 pastas de pulido de 2g.