



Elegance

Composite nano-híbrido fotopolimerizable

Descripción:

Elegance es un composite nano-híbrido radiopaco, bioinerte y fotopolimerizable en tonos Vita* con alta estética, excelente pulido, estabilidad del color, alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

*Marca registrada de Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, Alemania.

Referencias:

ML64433	A1	ML64436	A3.5
ML64434	A2	ML64449	AO3
ML64435	A3	ML64439	B2

Composición:

Circonio que contiene sílice y vidrio de bario molido 70-80%, mezcla de metacrilato 30-40%, dióxido de silicio 1-5%, iniciador <1%, fotoiniciador <1%, estabilizador <1%, inhibidor <1%, productor de opacidad <1 %, pigmento <1%.

Características:

- Elegance restaura/mejora la apariencia estética del diente restaurable
- Restaura/mantiene la función del diente restaurable
- Protege las estructuras biológicas de los dientes restaurables y los tejidos adyacentes.
- Para restauraciones directas de cavidades de clase I, II, III, IV y V.
- Para restauraciones indirectas como incrustaciones inlay y onlay.
- Para reconstrucción de muñones.

Propiedades físicas:

- Fotopolimerizado: 20 seg.
- Profundidad de polimerizado: $2,47 \pm 0,03$ mm
- Resistencia a la flexión: $116,3 \pm 3,8$ MPa
- Absorción de agua: $18,05 \pm 0,28$ $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Solubilidad del agua: $0,49 \pm 0,02$ $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Contracción de polimerizado: $3,0 \pm 0,46$ %

Precauciones:

- Se recomienda utilizar protección durante la aplicación del producto.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense las lentes de contacto, si los lleva y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: consulte con su médico.

Elegance

Composite nano-híbrido fotopolimerizable



FICHA PRODUCTO

- En caso de contacto con la piel o las mucosas: Lave con abundante agua. Si se produce irritación o sarpullido en la piel o mucosas, busque atención médica. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
- En caso de ingesta: Enjuague la boca. Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se encuentra bien.
- En caso de inhalación: Lleve a la persona a tomar aire fresco y facilite su respiración.
- Lávese bien las manos después de manipular el producto. Utilice el producto solo en un área bien ventilada.
- Se recomienda utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial para médico y paciente.

Precauciones que se deben tomar en caso de cambios en el rendimiento del dispositivo:

- Si durante el uso del producto observa una consistencia no homogénea, desigual, el producto no polimeriza o se observa un cambio de color del composite después de polimerizado, deje de usarlo inmediatamente.
- Retire la restauración de la cavidad dental con un instrumento dental adecuado.
- No permita que se trague el producto.
- Preguntar al paciente cómo se siente.
- Si el paciente notó algún efecto secundario indeseable, llame inmediatamente a un centro de salud local.
- Reúna todos los suministros restantes disponibles, no los vuelva a usar y manténgalos fuera del alcance en un lugar seguro hasta nuevo aviso.
- Póngase en contacto con el fabricante de inmediato e informe de cualquier cambio observado en el rendimiento del producto.

Advertencias:

- Después de extraer la cantidad deseada de material, enrosque el émbolo de la jeringa en sentido antihorario de media vuelta a completa para liberar la presión residual dentro de la jeringa y cierre inmediatamente la tapa de la jeringa, de modo que el material no se seque.
- El material es sensible a la luz. Evite un tiempo de manipulación demasiado prolongado en condiciones de iluminación intensa.
- No utilice el producto en pacientes que tengan antecedentes de reacciones alérgicas o de irritación graves producidas por el producto o cualquiera de sus componentes.
- Elegance no emite radiación y tampoco causa interferencias electromagnéticas.
- No debe usarse combinado con productos que contengan eugenol, ya que el eugenol puede alterar el proceso de polimerización.

Uso y almacenamiento:

- No esponga Elegance a temperaturas elevadas ni a luz intensa.
- Almacenar a una temperatura entre 4 y 28°C.
- No congele.
- La vida útil es de 4 años a partir de la fecha de fabricación.
- Compruebe la fecha de caducidad en el envase.
- No almacene materiales cerca de productos que contengan Eugenol.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Contenido:

Jeringa de 4gr.